




Aby rozpocząć ćwiczenia, wybierz najpierw **grupę** ćwiczeń, a następnie **kategorię** tematyczną. Przed uruchomieniem sesji możesz dostosować ustawienia według swoich preferencji:

### Liczba ćwiczeń

Ustaw maksymalną **liczbę ćwiczeń**, które chcesz wykonać. Dla niektórych grup ćwiczeń możesz wybrać kolejność według poziomu trudności (np. "najpierw krótkie odpowiedzi"). Opcja **gry na punkty** pozwala na zdobywanie punktów, a statystyki będą zapisywane w tabeli "Statystyki" na ekranie [ustawień](#).

**Ćwiczenia:**  
maks. 20


kolejność losowa       najpierw krótkie odpowiedzi




### Gra na punkty:

NIE  TAK

### Liczba słów do wyboru

Ustaw maksymalną **liczbę wyświetlanych słów** do wyboru prawidłowej odpowiedzi. Możesz wybrać, czy chcesz wyświetlać tylko prawdziwe słowa, czy też wyrazy z literami w innej kolejności niż w prawidłowej odpowiedzi.

 **Słowa:**  
maks. 10




zwiększaj liczbę słów od 2 do 10

prawdziwe słowa       pomieszaj litery

### Metoda odpowiadania


Wybierz preferowaną **metodę odpowiadania**. Możesz **wybierać** słowa, **wpisywać** litery lub **mówić** do mikrofonu. Podczas sesji ćwiczeń możesz zmieniać metodę, o ile nie grasz na punkty i nie wykonujesz [zestawu ćwiczeń](#) jako konkretny pacjent.




### Preferuję:

- ? zależy od ćwiczenia
-  wybieranie słów
-  wpisywanie liter
-  mówienie

### Rozkład klawiatury

Ustaw **minimalną liczbę liter**, które musisz wpisać na klawiaturze ekranowej. Jeśli wybierzesz opcję „dwuznaki”, pojedyncze przyciski będą zawierały głoski typu „SZ”, „CZ”, „RZ”. W przeciwnym wypadku każda litera będzie prezentowana osobno.


 **Litery:**  
min. 3

pojedyncze znaki       dwuznaki




### Ustawienia

Na ekranie ustawień możesz zarządzać listą pacjentów oraz ustawieniami przypisanymi do każdego z profili. Aby utworzyć nowy profil, wpisz imię lub nazwisko pacjenta, a następnie naciśnij przycisk  **Dodaj**. Wszystkie ustawienia, zakładki i własne ćwiczenia zapisane w aplikacji będą przyporządkowane do aktualnie wybranego profilu pacjenta.

### Importowanie profilu



Każdy profil pacjenta posiada swój unikalny numer („numer pacjenta”), który może być wykorzystany do importowania profilu na innym koncie użytkownika. Numer ten jest widoczny na ekranie ustawień pod nazwą pacjenta w polu „Aktualny pacjent”.

Jeżeli twój pacjent posiada własne konto użytkownika aplikacji i stworzy u siebie profil pacjenta, to może ci podać jego numer, abyś mógł importować profil w swojej wersji aplikacji. W tym celu wpisz otrzymany numer w pole „numer pacjenta” i naciśnij  **Import**. Od tej pory masz dostęp do wszystkich

ustawień, zakładki i ćwiczeń własnych pacjenta, którego profil importowałeś. Poza tym masz możliwość zadawać pacjentowi zadania domowe w formie gotowych zestawów ćwiczeń do rozwiązania.





## Zakładki

Zakładki to miejsce, gdzie możesz zapisać aktualne ćwiczenia, aby móc do nich szybko powrócić w przyszłości. Aby dodać ćwiczenie do zakładek, wybierz opcję menu  **Dodaj do zakładek pacjenta** na ekranie z ćwiczeniem. Zakładki są przypisane do konkretnego profilu pacjenta. Aby rozpocząć sesję ćwiczeń z zakładek, otwórz ekran Zakładki i wybierz kategorię tematyczną lub naciśnij **START** , aby rozpocząć wszystkie ćwiczenia z zakładek.




## Własne ćwiczenia

Na ekranie „Własne ćwiczenia” możesz tworzyć nowe ćwiczenia z własną treścią i zdjęciami. Ćwiczenia te zostaną przypisane do aktualnego profilu pacjenta. Aby utworzyć nowe ćwiczenie, wypełnij wymagane pola w formularzu „Własne ćwiczenia” i naciśnij  **Zapisz ćwiczenie**. Aby rozpocząć własną sesję ćwiczeń, naciśnij przycisk **START** .



## Zestawy ćwiczeń

Zestaw ćwiczeń to nic innego jak lista zapisanych ćwiczeń, która jest przyporządkowana do konta użytkownika, a nie do konkretnego pacjenta. Zestawy mogą zawierać dowolne ćwiczenia z aplikacji oraz ćwiczenia stworzone przez użytkownika. Aby dodać ćwiczenie do zestawu, wybierz na ekranie z ćwiczeniem opcję menu  **Dodaj do zestawu ćwiczeń**, uprzednio wybierając odpowiedni zestaw z listy własnych zestawów. Konfiguracja zestawów i tworzenie własnych ćwiczeń są dostępne na stronie [ustawień](#) twojego konta użytkownika.

### ZADANIA DOMOWE

Aby dodać zadanie domowe, wybierz aktualnego pacjenta, a następnie naciśnij przycisk **+** **ZAD. DOMOWE** w tabeli przy wybranym zestawie.

### MOJE ZESTAWY ĆWICZEŃ

Tabela przedstawia twoje zestawy ćwiczeń.


### PUBLICZNE ZESTAWY ĆWICZEŃ

Tabela przedstawia zestawy ćwiczeń innych użytkowników, które zostały udostępnione publicznie.

### HISTORIA ĆWICZEŃ

Jeśli uruchomisz zestaw ćwiczeń jako konkretny pacjent, punktacja będzie naliczana, a historia ćwiczeń zapisywana. Dla domyślnego pacjenta punktacja nie jest liczona, a statystyki nie są zapisywane.



Konfigurator ćwiczeń służy do generowania listy ćwiczeń na podstawie wybranych kryteriów. Możesz wylosować ćwiczenia z bazy wszystkich ćwiczeń aplikacji, wybierając **rodzaj afazji**, **deficyt/funkcję poznawczą** oraz **grupę ćwiczeń**. Aby wylosować listę ćwiczeń, wybierz rodzaj afazji i naciśnij przycisk **START** .

Możesz również doprecyzować swoją konfigurację poprzez wybór deficytu, grup ćwiczeń oraz liczby ćwiczeń dla każdej wybranej grupy. Aby zapamiętać ustawioną konfigurację dla aktualnego profilu pacjenta, wybierz przycisk

 **Zapisz ustawienia** ".

## Skróty klawiszowe

Do wpisywania liter podczas sesji ćwiczeń możesz używać klawiatury komputera. Dostępne są następujące skróty klawiszowe:

### Nawigacja

STRZAŁKA W PRAWO	dalej
STRZAŁKA W LEWO	wstecz
SPACJA	podowiedź
ENTER	rozwiązanie
ESCAPE	wyjście
SHIFT + U	ukryj pytanie
SHIFT + D	wyłącz dźwięk
SHIFT + P	pełny ekran
SHIFT + K	skróty klawiszowe
SHIFT + H	prześlij opinię

### Polskie znaki

SHIFT + A	Ą
SHIFT + E	Ę
SHIFT + O	Ó
SHIFT + C	Ć
SHIFT + L	Ł
SHIFT + N	Ń
SHIFT + S	Ś
SHIFT + X	Ż
SHIFT + Z	Ź