

## Ustawienia sesji

Aby rozpocząć ćwiczenia, wybierz najpierw **grupę** ćwiczeń, a następnie **kategorię** tematyczną. Przed uruchomieniem sesji możesz dostosować ustawienia według własnych preferencji:

### Liczba ćwiczeń

Ustaw **maksymalną liczbę** ćwiczeń, którą zamierzasz wykonać podczas planowanej sesji.

Możesz również zmienić **kolejność** wyświetlania ćwiczeń. W zależności od grupy możesz wybrać losową, standardową, alfabetyczną kolejność, albo posortować ćwiczenia według ilości liter w prawidłowej odpowiedzi.

### Metoda odpowiadania

W trakcie rozwiązywania zadań możesz **wybierać** słowa, **wpisywać** litery lub **mówić** do mikrofonu. Możesz dowolnie przełączać pomiędzy metodami w trakcie sesji (za wyjątkiem gry na punkty).

Opcja **gra na punkty** pozwala na zdobywanie punktów za rozwiązane ćwiczenia. Statystyki ćwiczeń wraz z punktacją będą zapisywane na ekranie [Ustawień](#) pacjenta.

### Liczba słów do wyboru

Ustaw **maksymalną liczbę** wyświetlanych słów do wyboru prawidłowej odpowiedzi. Aby stopniowo zwiększać liczbę słów po każdym pytaniu, wybierz opcję **zwiększaj liczbę słów**.

Możesz wybrać, czy chcesz wyświetlać tylko prawdziwe słowa, czy też wyrazy z literami w innej kolejności niż w prawidłowej odpowiedzi.

### Rozkład klawiatury

Możesz zwiększyć **minimalną liczbę** liter do wyświetlenia na klawiaturze ekranowej, jeśli używasz wpisywania liter jako metodę odpowiadania.

Jeśli wybierzesz opcję „dwuznaki”, pojedyncze przyciski będą zawierały głoski typu „SZ”, „CZ”, „RZ”. W przeciwnym wypadku każda litera będzie prezentowana osobno.

Specyficzne ustawienia dostępne dla niektórych grup ćwiczeń:

### „Wybieranie”

Wybierz pomiędzy opcjami doboru obrazka do pasującego wyrazu, albo wskazywania niepasującego obrazka.

### „Krzyżówki”

Ustal liczbę liter w rozwiązaniu krzyżówki, lub podaj własne rozwiązanie, które będzie użyte do wytypowania haseł.

### „Matematyka”

Określ zakres liczb w działaniach matematycznych i wybierz, czy uzupełniać dowolne miejsce w równaniu, czy jedynie jego wynik.

### „Definicje” i „Dokończ wyraz”

Określ liczbę wyrazów, a następnie zdecyduj, czy wolisz dopasowywać wyraz do definicji, czy definicję do wyrazu.

### „Zegar”

Ustaw wygląd tarczy zegara oraz precyzyjnie wskaźnika czasu.

### Inne ustawienia

Zadecyduj kiedy zapisywać statystyki oraz ustaw konfigurację początkową.

#### Rodzaj ćwiczeń:

- Dopasuj wyraz do definicji
- Dopasuj definicję do wyrazu

#### Poziom trudności:

- łatwy (co kwadrans)
- średni (pełne minuty)
- trudny (niepełne minuty)


#### Ćwicz na pełnym ekranie

NIE  TAK


ukryj treść pytania

wyłącz dźwięk

W niektórych grupach ćwiczeń znajdziesz dodatkowo tzw. generatory ćwiczeń, które obejmują:

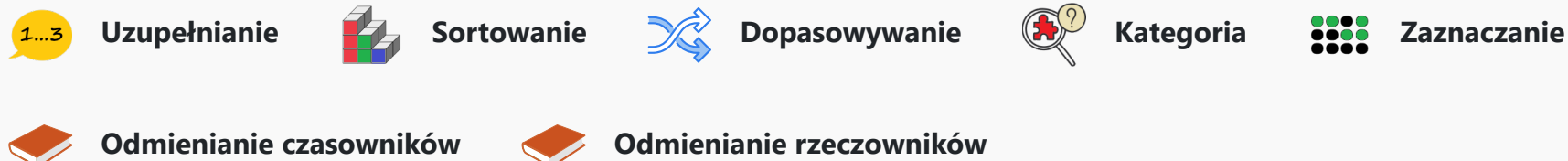

Każdy generator posiada specyficzne ustawienia, które umożliwiają szczegółową konfigurację sesji, np. wybór kategorii lub liczby wyrazów do wyświetlenia. Aby zmienić ustawienia generatora, użyj przycisku **USTAWIENIA**. Następnie naciśnij **START**, aby wygenerować maksymalnie 100 ćwiczeń i rozpocząć sesję z wylosowanymi zadaniami.

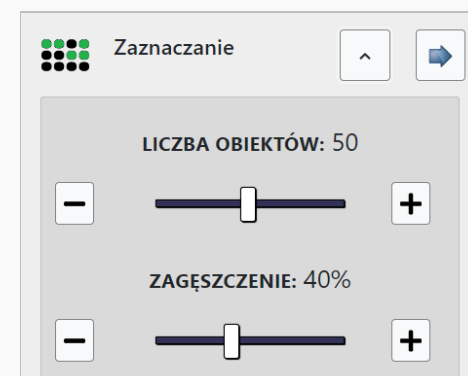

W generatorze **Zaznaczanie** możesz ustawić **liczbę obiektów** (słów / obrazków) do wyboru oraz **zagęszczenie**, czyli procentową część poprawnych odpowiedzi wśród wszystkich wyświetlonych obiektów.

Przykładowo wybranie **20** obiektów z zagęszczeniem **50%** oznacza, że spośród **20** obiektów do wyboru, **10** będzie stanowiło poprawną odpowiedź.

## Ekran aplikacji



Na ekranie ustawień możesz zarządzać listą pacjentów oraz ustawieniami przypisanymi do każdego z profili. Aby utworzyć nowy profil, wpisz imię lub nazwisko pacjenta, a następnie naciśnij **+ Dodaj**. Wszystkie ustawienia, zakładki i własne ćwiczenia widoczne w aplikacji będą przyporządkowane do aktualnie wybranego profilu pacjenta.

### Dane pacjenta

Jeżeli wypełnisz formularz zawierający dane pacjenta, to aplikacja automatycznie utworzy ćwiczenia z pytaniami dotyczącymi jego życia i rodziny. Dane podane w tym formularzu nie są widoczne dla innych użytkowników i wykorzystywane są jedynie do wygenerowania ćwiczeń, które będą zapisane w grupie „Wiedza i życie”, w kategorii „wiedza o mnie”.

### Importowanie profilu


Każdy profil pacjenta posiada swój unikalny numer („Numer pacjenta”), który może być wykorzystany do importowania profilu na innym koncie użytkownika. Numer ten jest widoczny na ekranie ustawień, pod nazwą pacjenta, w polu „Aktualny pacjent”.


Jeżeli Twój pacjent korzysta z aplikacji z domu i stworzy własny profil, a następnie udostępni Ci przypisany numer, będziesz mógł importować jego profil do swojej wersji aplikacji. W tym celu wpisz otrzymany numer w pole „numer pacjenta” i naciśnij **Import**. Od tej pory będziesz mieć dostęp do wszystkich ustawień, zakładek i ćwiczeń własnych pacjenta, którego profil importowałeś. Poza tym będziesz mieć możliwość przypisywania pacjentowi zadań domowych w formie zestawów ćwiczeń, a także monitorowania jego historii ćwiczeń.


### Statystyki

Tabela statystyk przedstawia historię ćwiczeń aktualnie wybranego pacjenta. W tabeli znajdziesz takie informacje, jak: data i czas wykonania sesji, konfiguracja startowa, ilość prawidłowych odpowiedzi oraz liczba i procent zdobytych punktów. Statystyki są zapisywane na bieżąco w zależności od ustawienia „Zapisuj statystyki” („zawsze”, „tylko w grze na punkty” lub „nigdy”).


Jeżeli Twój pacjent korzysta z aplikacji z domu i stworzy własny profil, a następnie udostępni Ci przypisany numer, będziesz mógł importować jego profil do swojej wersji aplikacji. W tym celu wpisz otrzymany numer


w pole „numer pacjenta” i naciśnij  **Import** . Od tej pory będziesz mieć dostęp do wszystkich ustawień, zakładek i ćwiczeń własnych pacjenta, którego profil importowałeś. Poza tym będziesz mieć możliwość przypisywania pacjentowi zadań domowych w formie zestawów ćwiczeń, a także monitorowania jego historii ćwiczeń.

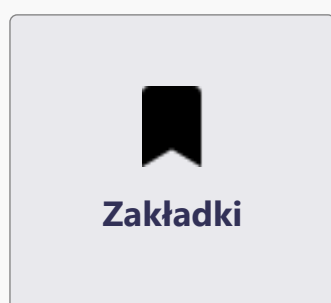

Zakładki to miejsce, gdzie możesz zapisać aktualne ćwiczenie, aby móc do niego swobodnie powrócić. Aby dodać ćwiczenie do zakładek, wybierz opcję menu  **Dodaj do zakładek pacjenta** na ekranie z ćwiczeniem.


Zakładki są przypisane do konkretnego profilu pacjenta i dodatkowo automatycznie grupowane w kategorie.


Aby rozpocząć sesję z ćwiczeniami z zakładek, wybierz kategorię tematyczną lub naciśnij **START**  .  
W tabeli zakładek możesz usuwać lub uruchamiać pojedyncze ćwiczenia z listy.

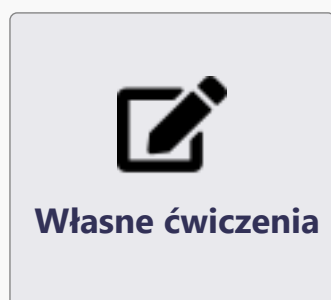

Na ekranie „Własne ćwiczenia” możesz tworzyć, edytować i uruchamiać swoje ćwiczenia z własną treścią i zdjęciami. Przesyłane zdjęcia powinny być w formacie jpg, jpeg, png lub gif, o wielkości maksymalnie do 5 MB. Utworzone ćwiczenia zostaną przypisane do aktualnego profilu pacjenta.


Aby utworzyć nowe ćwiczenie, wypełnij wymagane pola w formularzu „Własne ćwiczenia” (tj. Treść polecenia, Pytanie, Prawidłowa odpowiedź, Alternatywne (nieprawidłowe) odpowiedzi) i naciśnij

 **Zapisz ćwiczenie** .

Uruchom własną sesję ćwiczeń, naciskając **START**  .

Do edycji lub usunięcia ćwiczenia użyj przycisków  albo  w tabeli z listą własnych ćwiczeń.




Zestawy ćwiczeń umożliwiają kompletowanie list ćwiczeń przyporządkowanych do konta użytkownika. Zestawy mogą zawierać dowolne ćwiczenia z aplikacji oraz ćwiczenia stworzone przez użytkownika według gotowych szablonów. Aby dodać ćwiczenie do wybranego zestawu, wybierz na ekranie z ćwiczeniem opcję menu  **Dodaj do zestawu ćwiczeń** . Własne zestawy możesz tworzyć na [stronie z zestawami ćwiczeń](#).


#### ZADANIA DOMOWE

Tutaj widoczne są zadania domowe do rozwiązania przez aktualnego pacjenta. Aby zadać zadanie domowe, wybierz profil pacjenta, a następnie naciśnij **+ ZAD. DOMOWE** w tabeli, przy wybranym zestawie ćwiczeń.

#### MOJE ZESTAWY ĆWICZEŃ

Tabela przedstawia Twoje prywatne zestawy ćwiczeń, które możesz tworzyć, edytować i usuwać na [stronie z zestawami ćwiczeń](#). Aby uruchomić zestaw naciśnij **START**  .

#### PUBLICZNE ZESTAWY ĆWICZEŃ

Tabela przedstawia zestawy ćwiczeń użytkowników, którzy udostępnili je publicznie. Tych zestawów możesz dowolnie używać w swojej aplikacji, a także tworzyć na ich podstawie zadania domowe. Aby uruchomić zestaw, naciśnij **START**  .

#### HISTORIA ĆWICZEŃ

Historia ćwiczeń umożliwia śledzenie postępów i statystyk wykonywanych zestawów / zadań domowych. Jeśli uruchomisz zestaw ćwiczeń jako konkretny pacjent, punktacją będzie naliczana, a historia ćwiczeń będzie zapisywana. Zapisywane będą takie informacje jak data i czas wykonania zestawu, liczba zdobytych punktów oraz wynik procentowy. Szczegółowe informacje o wynikach poszczególnych ćwiczeń w zestawie dostępne są na [stronie pacjenta](#).

Jeśli chcesz powtórzyć sesję ćwiczeń, naciśnij **START**  przy wybranym zestawie w historii ćwiczeń.


Gdy wybierzesz profil **Domyślnego pacjenta** punktacją nie będzie naliczana, a statystyki nie będą zapisywane w historii. W takim przypadku masz jednak dostęp do ustawień sesji, które nie są dostępne, kiedy wykonujesz zestaw ćwiczeń jako pacjent.



Dzięki konfiguratorowi ćwiczeń możesz tworzyć zautomatyzowane sesje treningowe, skonstruowane na podstawie wybranego rodzaju afazji, deficytu funkcji poznawczej, którą chcesz ćwiczyć, lub według konkretnych grup ćwiczeń.

Aby wylosować listę ćwiczeń, wybierz rodzaj afazji i naciśnij przycisk **START** ➔ .


Możesz również doprecyzować swoją konfigurację poprzez wybór deficytu, wybór grup ćwiczeń oraz liczby ćwiczeń dla każdej wybranej grupy.


Aby zapamiętać ustawioną konfigurację dla aktualnego profilu pacjenta, wybierz  **Zapisz ustawienia** .





Wyszukiwarka ćwiczeń prezentuje w przystępnej formie 37.040 ćwiczeń dostępnych na stałe aplikacji. Możesz wyszukiwać ćwiczenia według słów kluczowych, filtrować je według grup ćwiczeń, oraz sortować według dowolnych pól w tabeli. Wybrane ćwiczenia możesz uruchamiać bezpośrednio z wyszukiwarki, lub dodawać je do zakładki pacjenta albo do własnych zestawów ćwiczeń.

Naciśnij **START** ➔ , aby uruchomić ćwiczenie.


Naciśnij  , aby dodać ćwiczenie do zakładki pacjenta.


Naciśnij  , aby dodać ćwiczenie do zestawu (pamiętaj, aby wcześniej wybrać własny zestaw ćwiczeń w polu Twój zestaw).

## Sesja ćwiczeń

Do nawigacji pomiędzy zadaniami używaj przycisków  i  . Aby przełączać

pomiędzy metodami odpowiadania używaj przycisków

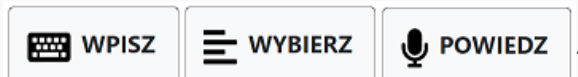



Jeżeli potrzebujesz podpowiedzi użyj przycisku  . W zależności od rodzaju


ćwiczenia, pojawi się podpowiedź zawierająca kolejną literę lub słowo w prawidłowej


odpowiedzi. Użycie przycisku  wyświetli prawidłowe rozwiązanie aktualnego

zadania.

Jeśli zaznaczyłeś opcję „**gra na punkty**”, lub jeśli uruchomiłeś Zestaw ćwiczeń jako konkretny pacjent, wtedy nie ma możliwości swobodnego przechodzenia między ćwiczeniami, ani zmiany metod odpowiadania. Podczas gry na punkty możliwe jest jedynie wybieranie słów, natomiast podczas sesji z Zestawem metoda odpowiadania zależy od wyboru autora zadania, który ustala ją podczas tworzenia/dodawania go do Zestawu ćwiczeń.

Aby ukryć treść pytania i ćwiczyć ze słuchu użyj przycisku  . Naciśnij  , aby wyłączyć


głos lektora. Przyciskiem  możesz włączyć tryb pełnoekranowy.

Po najechnaniu na  w prawym górnym rogu, rozwinię się boczne menu, w którym

znajdziesz możliwość dodawania aktualnego ćwiczenia do Zakładek lub do Zestawów ćwiczeń oraz zmiany aktualnej metody odpowiadania. Jeżeli wybierzesz konkretny sposób, to będzie on automatycznie aktywny po przejściu do następnego ćwiczenia. Natomiast jeśli wybierzesz opcję „**zależy od ćwiczenia**”, to po przejściu do następnego zadania, aktywna będzie poprzednio używana metoda.

W ćwiczeniach polegających na Dopasowywaniu słów, odmienianiu wyrazów oraz w Krzyżówkach możesz dodatkowo zdecydować, czy po rozwiązaniu jednego pytania lektor będzie automatycznie przechodził do następnego. Użyj do tego opcji

**Przechodź autom. do kolejnego pytania** .

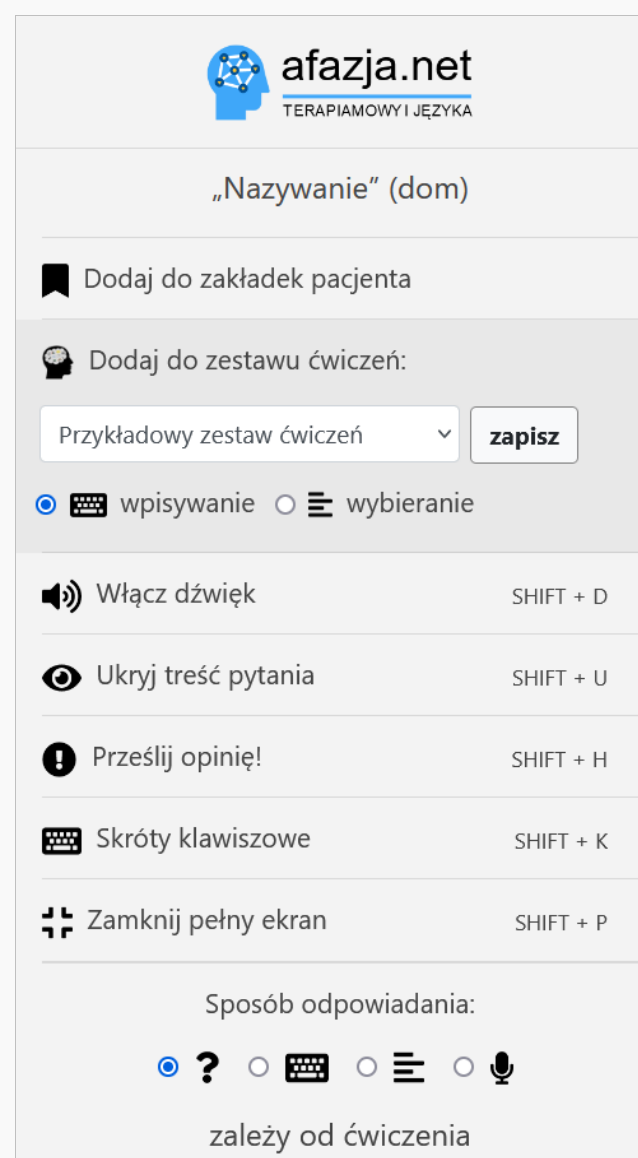

# Skróty klawiszowe


Podczas ćwiczeń do wpisywania prawidłowej odpowiedzi możesz używać klawiatury komputerowej. Dostępne są następujące skróty klawiszowe:

## Nawigacja

STRZAŁKA W PRAWO	dalej
STRZAŁKA W LEWO	wstecz
SPACJA	podowiedź
ENTER	rozwiązanie
ESCAPE	wyjście
SHIFT + U	ukryj pytanie
SHIFT + D	wyłącz dźwięk
SHIFT + P	pełny ekran
SHIFT + K	skróty klawiszowe
SHIFT + H	prześlij opinię

## Polskie znaki

SHIFT + A	Ą
SHIFT + E	Ę
SHIFT + O	Ó
SHIFT + C	Ć
SHIFT + L	Ł
SHIFT + N	Ń
SHIFT + S	Ś
SHIFT + X	Ż
SHIFT + Z	Ź

 Więcej informacji na stronie [afazja.net](https://afazja.net)

[Jak to działa?](#) | [Opis aplikacji](#) | [Jak ćwiczyć?](#)